



FUTURO™ AANPASBARE RUGBANDAGE

46820



MATIGE
STEUN


Dubbel trekkoordsysteem maakt
verstellen gemakkelijk en snel.

IDEAAL VOOR:

Bukken, tillen, dagelijkse activiteiten

HOOFDKENMERKEN:

- 1 Verwijderbare lumbale kussentjes voor demping en extra ondersteuning.
- Elastische stukken aan de zijkant tegen wegglijden en kreukelen.
- Geschikt voor tailles met een omtrek tot 130 cm.

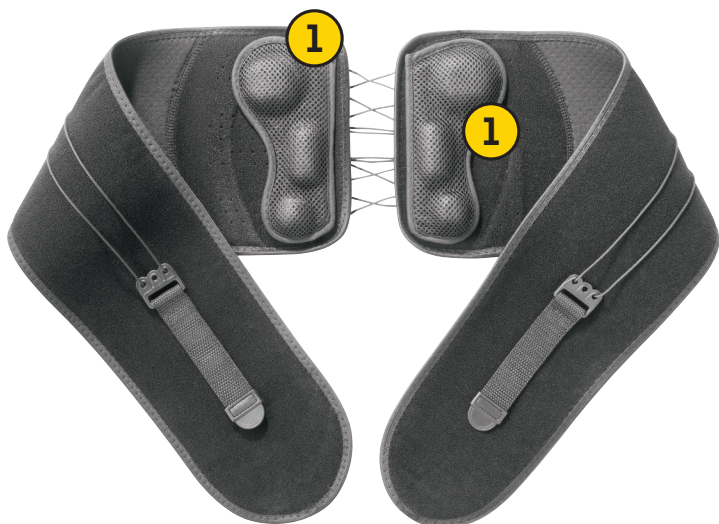

ADEMEND
MATERIAAL

Beoogd gebruik: Ter ondersteuning van een stijve, geblesseerde of pijnlijke rug.

LET OP: Sommige mensen zijn gevoelig voor neopreen of neopreen-rubbermengsels. Stop het gebruik en raadpleeg een arts als er uitslag ontstaat.

Samenstelling: Nylon, Polyester, Neopreen, Spandex, EVA, Polyurethaanschuim, TPE+POM+Nylon, Polypropyleen, Metaal.
Stop het gebruik en raadpleeg een arts als er ongemak of pijn ontstaat, of als de pijn/het ongemak aanhoudt of verergert.


3M en FUTURO zijn handelsmerken van 3M.

MAAT:

Referentie	CNK	CM
46820	2833903	73.7-129.5




DRAAGINSTRUCTIES:

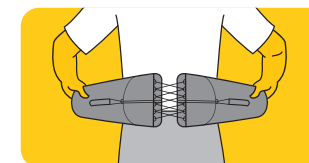

Verwijder, indien gewenst, de kussentjes langs de binnenzijde van de bandage. Centreer het trekkoordsysteem over het midden van de wervelkolom.



Wikkel de panelen rond de taille en bevestig de haak-en-lus sluiting zodat u een nauwsluitende, maar comfortabele steun bekommt.

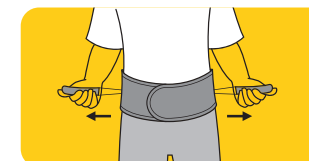

Maak de riempjes met de trekkoorden aan weerszijden los en trek ze in een buitenwaartse beweging totdat u het gewenste steunniveau bekommt.



Breng de riempjes naar voor en bevestig. Pas de steun aan indien nodig.

3M Belgium bvba/sprl
Afd. Consumer Health Care
www.3M.BE/futuro

3M Nederland B.V.
Afd. Consumer Health Care
www.3M.NL/futuro

