


SANOHRA *silicon*

Het huidvriendelijke medische silicone is zeer zacht en laat zich optimaal kneden. Eenmaal aangebracht in de oorschelp neemt het de juiste pasvorm aan en sluit zo de gehoorgang beschermend af, zonder dat dit een storend drukgevoel in het oor geeft.

SANOHRA *silicon* beschermt tegen storende geluiden en zorgt voor een aangename nachtrust of een verhoogde concentratie tijdens het werken. **SANOHRA *silicon*** verhindert het binnendringen van water in de gehoorgang en beschermt het gevoelige oor tegen tocht.

Gebruiksaanwijzing

1. Kneed de siliconen kussentjes **met schone handen** goed door en maak er een rond bolletje van. Geen langwerpige vorm.
2. Afzonderlijke kussentjes niet delen!
3. Doe de arm over het hoofd en til de oorschelp aan de andere kant van het hoofd iets omhoog. Dit zal de gehoorgang verruimen.
4. Plaats het bolletje in de oorschelp over de opening van de gehoorgang.
5. Druk het bolletje voorzichtig aan zodat de gehoorgang goed afgedicht wordt en het passend en veilig vast blijft zitten.
6. De oorschelp weer loslaten.
7. Na gebruik voorzichtig verwijderen, zonder abrupte bewegingen.
8. Om hygiënische redenen wordt slechts eenmalig gebruik aangeraden.

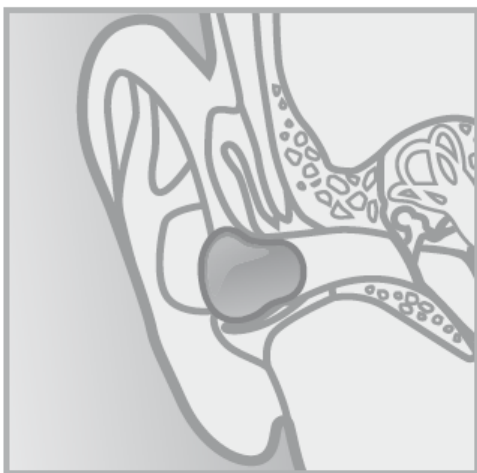

Niet geschikt voor gebruik met duiken! De waterdruk op grote diepte zou de siliconen dopjes verder de gehoorgang induwen (Niet meer dan 1 meter waterdiepte). Tijdens springen in het water of door heftige bewegingen kan de gehoorbescherming kwijt raken!

Kinderen mogen de oorbescherming alleen onder leiding van volwassenen gebruiken. Bij ontstekingen in het oor, verwondingen van het trommelvlies of gebruik van een trommelvliesbuisje vooraf de behandelende arts raadplegen.

Gegevens van de dempingswaarde

SNR = 24 db		
H = 27 db	M = 20 db	L = 18 db

Model: Bio – PA -02

89/686/CE (EN 352-2)



Imp./Distr. Medzorg Ned. BV
www.oordopvliegtuig.nl
www.medzorg.nl

Fabrikant:

BIOTAP S.L., E-08360 Canet de Mar (Barcelone)

Distributeur:

Innosan GmbH
D- 68723 Schwetzingen
www.innosan.eu