

Uw voordelen in één oogopslag:

Voor meer levenskwaliteit, onafhankelijkheid en flexibiliteit, elke dag weer.



Uw productvoordeel

Uw voordeel

Gladde en luchtdoorlatende tricotconstructie

Eenvoudig aan en uit te trekken, en aangenaam te dragen

Speciale tricotconstructie van de onderkous

Blijvend goede pasvorm

Subtiel design en neutrale kleuren

Bedoeld voor dagelijks gebruik

Bewezen kwaliteit*


Meer behandelzekerheid

* RAL en STANDARD 100 door OEKO-TEX® getest.


LR People.Health.Care.

Voor actieve ondersteuning van de genezing!

Onze tips:

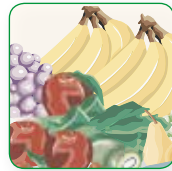

Let op uw gewicht. Eet gebalanceerd en caloriearm. Dat houdt in: voedzame maaltijden met veel verse groente en fruit. Wees voorzichtig met vet. Dit is niet alleen goed voor uw gewicht, maar ook voor uw huid.

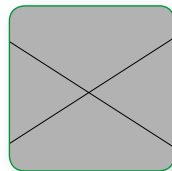

Beperk het gebruik van nicotine en alcohol. Drink voldoende om het lichaam te ontslakken.



Vermijd lang staan of zitten. Kom in beweging: Neem wat vaker de trap. Een wandeling of een fietstochtje in de frisse buitenlucht is goed om de kuitspieren te trainen en stimuleert de bloedcirculatie in de benen.



En niet te vergeten:

compressie is vooral werkzaam in combinatie met bewegen. Al na de eerste stappen merkt u over het algemeen een duidelijke verbetering van de klachten.

Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG
Westerwaldstraße 4 · D-56579 Rengsdorf

Lohmann & Rauscher GmbH
Johann-Schorsch-Gasse 4 · A-1141 Wien

Laboratoires Lohmann & Rauscher s.a.
Rue Visé-Voie 81, Boîte 2 · B-4000 Liège-Rocourt

Lohmann & Rauscher B.V.
Antennestraat 86-B · NL-1322 AS Almere

LR People.Health.Care.

Actico® UlcerSys **NIEUW**
Eenvoud in compressie.



9507169 0817 nl

www.Lohmann-Rauscher.com

Ontdek hoe eenvoudig het behandelen van ernstige vaatstoornissen kan zijn: met Actico UlcerSys, een uit twee lagen bestaand compressiekoussysteem dat voor het behandelen van ulcus cruris venosum (open been) en het voorkomen daarvan wordt gebruikt.



Wat betekent 'ulcus cruris venosum' eigenlijk?

Ulcus cruris venosum


(ook wel veneuze open wond op het onderbeen of 'open been' genoemd)

... betekent een weefseldefect van het onderbeen als gevolg van een chronische functiestoornis van de bloedvaten (veneuze insufficiëntie).


Bloedvaten zijn met hun kleppen verantwoordelijk voor de terugstroom van het bloed naar het hart. Als mensen ouder worden, krijgen ze vaak last van minder functionerende kleppen in de bloedvaten. Als gevolg daarvan kunnen bloed en vocht zich ophopen in omliggende weefsels (oedeem), vooral in de onderbenen. Dit heeft tot gevolg dat de circulatie in dat gebied onvoldoende wordt.

Door het afsterven van weefsel dat niet genoeg van bloed wordt voorzien, ontstaat een wond die 'ulcus cruris venosum' (open been) wordt genoemd.

Een efficiënte compressietherapie ondersteunt de bloedvaten bij hun functie, verhindert dat er weer vocht naar het omliggende weefsel lekt en zorgt dat vocht voldoende wordt afgevoerd. Zo wordt een nieuwe vochtopenhoping tegengegaan en wordt de terugstroom van bloed naar het hart weer op gang gebracht.

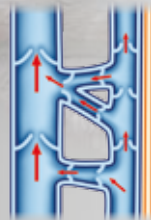

Gezonde bloedvaten

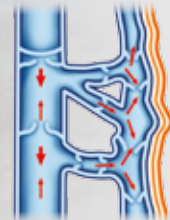

Onvoldoende werkende bloedvaten



Compressie ondersteunt de terugstroom

Het geheim zit hem in de combinatie

Actico UlcerSys is aangenaam te dragen en bestaat uit een onder- en bovenkous. De beide componenten kunnen eenvoudig en snel worden aan- en uitgetrokken.



Onderkous

- kan dag en nacht worden gedragen
- fixeert wondverbanden
- beschermt de gevoelige huid
- lichte compressie
- wasbaar op 60 °C

Bovenkous

- wordt overdag over de onderkous gedragen
- zorgt voor de therapeutisch noodzakelijke compressedruk
- wasbaar op 40 °C

Actico UlcerSys zorgt voor de benodigde drukverdeling en voldoet aan de eisen voor een moderne compressiebehandeling! Als medisch hulpmiddel kan het door uw arts worden voorgeschreven.

