


SANOHRA swim voor volwassenen

SANOHRA swim voor kinderen en volwassenen met kleine gehoorgang

Tijdens het zwemmen, baden of douchen kan water diep in de gehoorgang tot aan het trommelvlies binnendringen. Dat is merkbaar aan een vermindering van het gehoor.

Het vocht in de gehoorgang laat het beschermende oorsmeer (cerumen) opzwellen en biedt zo in combinatie met lichaamswarmte een ideale voedingsbodem voor bacteriën, kiemen en schimmels. Ontstekingen in de gehoorgang en het trommelvlies (otitis externa) kunnen daarvan het gevolg zijn. Vooral kinderen en mensen met kleine gehoorgang worden hierdoor getroffen.

SANOHRA swim beschermt de gehoorgang en het trommelvlies tegen het binnendringen van water.

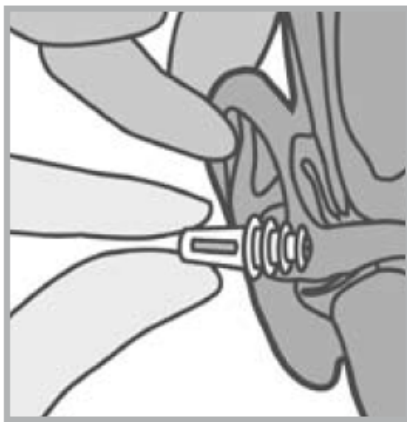

Inbrengen van SANOHRA swim

Doe de arm over het hoofd en til de oorschelp aan de andere kant van het hoofd iets omhoog. Dit zal de gehoorgang verruimen. Pak het staafje van **SANOHRA swim** met duim en wijsvinger van de andere hand vast en breng deze, met de lamellen vooraan, met licht draaiende bewegingen in de gehoorgang in. Bij het andere oor precies zo te werk gaan.

Kinderen mogen de oorbescherming alleen onder leiding van volwassenen gebruiken. Bij ontstekingen in het oor, verwondingen van het trommelvlies of gebruik van buisjes vooraf de behandelende arts raadplegen.

Uithalen van SANOHRA swim

Til de oorschelp zoals beschreven voor het uithalen licht op. De oorbescherming **niet abrupt verwijderen**, maar met licht draaiende bewegingen eruit halen.

Niet geschikt voor gebruik met duiken! De waterdruk op grote diepte zou de oordopjes verder de gehoorgang induwen. (Niet meer dan 1 meter waterdiepte)

Spoel **SANOHRA swim** na gebruik met helder water af, om zout- en chloorresten te verwijderen. **SANOHRA swim** kan met milde reinigingsmiddelen (zeep) gereinigd worden. Laten drogen! **SANOHRA swim** kan bij het juiste onderhoud altijd weer gebruikt worden.