

# Suprasorb® P sensitive **NIEUW**

Vijf zachte lagen voor comfort bij de patiënt.

## Steunlaag:

- waterdampdoorlatend (hoge MVTR)
- glad en soepel<sup>5</sup>
- vochtwerend
- bacteriënwerend

## Suprasorb P sensitive border met superabsorberende absorptiekern:

- superabsorberende polymeervezels
- hoog exsudaatabsorberend vermogen
- draagt bij aan vermindering van het maceratie risico<sup>6</sup>

## Non-woven laag:


- helpt het exsudaat te verdelen<sup>3</sup>

## Absorberend PU-schuim\*:

- efficiënt exsudaatmanagement<sup>3,4</sup>
- biedt comfort en een polstereffect<sup>3</sup>

## OptiSil siliconen wondcontactlaag:

- de technologie die perforatie en siliconenolie met elkaar verbindt
- maakt snelle exsudaatopname in het verband mogelijk
- zacht, vermindert daardoor pijn bij het verwijderen van het verband<sup>1,2,3</sup>
- verlaagt het risico van vastkleven aan de wond<sup>1</sup>

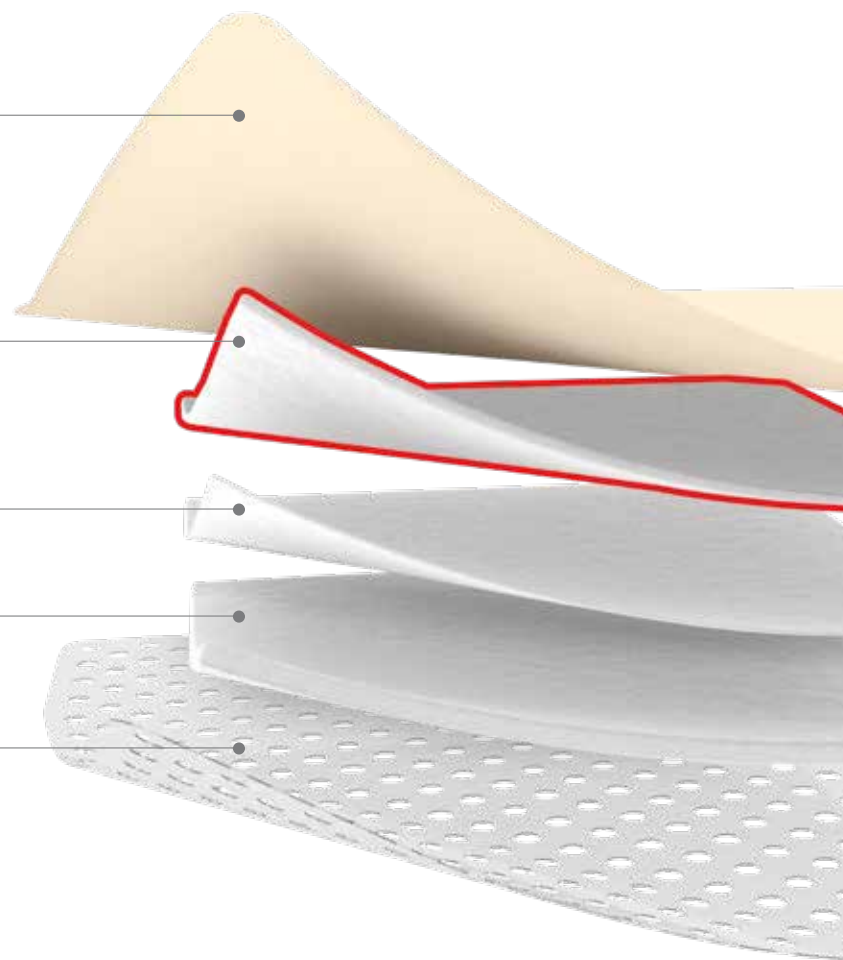

\* polyurethaanschuim

## Eenvoudige toepassing:<sup>3</sup>



Met 2 of 3 aftrekbare beschermfolies die voorkomen dat de kleeflaag met handschoenen wordt aangeraakt.

Suprasorb P sensitive is veelzijdig te gebruiken, ook voor wondverzorging op moeilijke plaatsen.

**L&R** People.Health.Care.

## Suprasorb® P sensitive **NIEUW**

border (met superabsorberende absorptiekern)

Afmetingen van het verband (cm)	Afmetingen van het wondkussen (cm)	REF	ZI	VE
10 x 10	6,2 x 6,2	139 061	16795768	10/200
12,5 x 12,5	8,5 x 8,5	139 062	16795776	10/200
7,5 x 8,5	4,5 x 5	139 068	16795784	10/200
15 x 15	10,5 x 10,5	139 069	16795792	10/150
20 x 20	15 x 15	139 070	16795806	10/100

## Suprasorb® P sensitive **NIEUW**

border lite (zonder superabsorberende absorptiekern)

Afmetingen van het verband (cm)	Afmetingen van het wondkussen (cm)	REF	ZI	VE
5 x 5	2,5 x 2,5	139 080	16795822	10/240
5 x 10	2,5 x 6	139 081	16795830	10/200
10 x 10	6,2 x 6,2	139 083	16795857	10/200
7,5 x 8,5	4,5 x 5	139 086	16795849	10/200
9 x 15	5 x 10,5	139 087	16795865	10/200
10 x 20	5 x 15	139 088	16795873	10/150

## Suprasorb® P sensitive **NIEUW**

non-border (zonder superabsorberende absorptiekern)

Afmetingen van het verband (cm)	REF	ZI	VE
5 x 5	139 350	16848004	10/240
10 x 10	139 351	16848012	10/100
10 x 20	139 352	16848020	10/150
15 x 15	139 353	16848047	10/100
20 x 20	139 354	16848055	10/100
7,5 x 7,5	139 455	16848098	10/150
15 x 20	139 456	16848101	10/100

## Referenties:

- Davies, P. (2008). Evidence review: the clinical benefits of Safetac® technology in wound care. Journal of wound care.
- Ann Pardoe, Tissue Viability Nurse, NHS North East London and the City, London.
- Barrows, C. (2009). Enhancing Patient Outcomes-Reducing the Bottom Line: The Use of Antimicrobial Soft Silicone Foam Dressing in Home Health. Home Healthcare Now, 27(5), 279-284.
- Pukki, T., Tikkanen, M., & Halonen, S. (2010). Assessing Mepilex® Border in post-operative wound care. Wounds UK, 6(1), 30-40.
- Stephannie K. Miller, Neal Sharma, Lauren C. Abernethy, Kimberly N. Blasiolo, Judith A. Fulton (2015). Analysis of the Pressure Distribution, Qualities of a Silicone Border Foam Dressing. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2015;42(4):346-351. Published by Lippincott Williams & Wilkins
- Stephen-Haynes, J., & Timmons, J. (2009). Cutimed® Siltec: a foam dressing range with super absorbers and a silicone wound contact layer. Wounds UK, 5(2), 69-72.

Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG · Westerwaldstraße 4 · D-56579 Rengsdorf  
Lohmann & Rauscher GmbH · Johann-Schorsch-Gasse 4 · A-1141 Wien  
Lohmann & Rauscher B.V. · Antennestraat 86-B · NL-1322 AS Almere


**L&R** People.Health.Care.

## Suprasorb® P sensitive **NIEUW**

Veelzijdig te gebruiken, beschermend en ontziet de wond.

Efficiënt exsudaatmanagement<sup>3,4</sup>

Zacht en comfortabel<sup>1,2</sup>

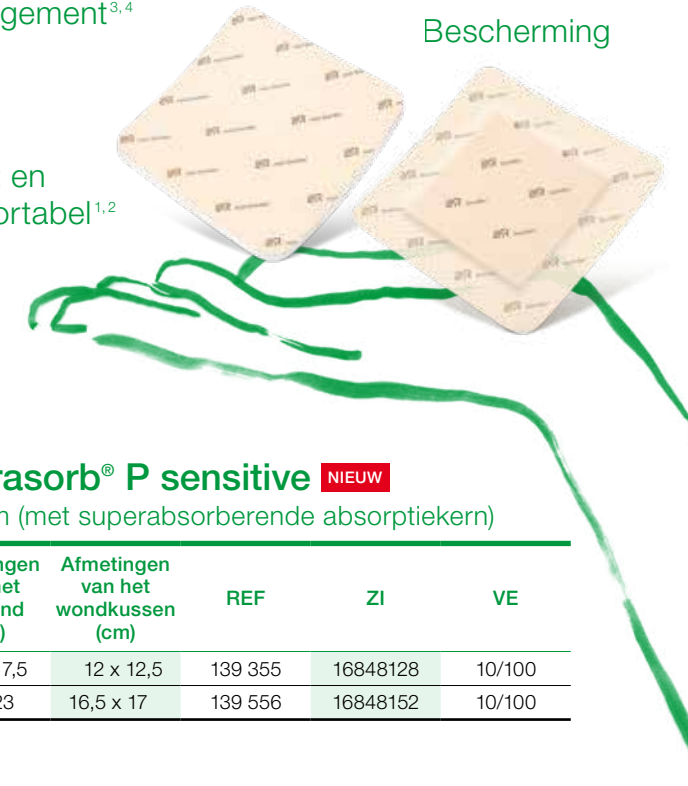

Bescherming

## Suprasorb® P sensitive **NIEUW**

sacrum (met superabsorberende absorptiekern)

Afmetingen van het verband (cm)	Afmetingen van het wondkussen (cm)	REF	ZI	VE
17 x 17,5	12 x 12,5	139 355	16848128	10/100
23 x 23	16,5 x 17	139 556	16848152	10/100

## Suprasorb® P sensitive **NIEUW**

heel (met superabsorberende absorptiekern)

Afmetingen van het verband (cm)	Afmetingen van het wondkussen (cm)	REF	ZI	VE
23,5 x 25	17,5 x 19	139 356	16848136	10/100

## Suprasorb® P sensitive **NIEUW**

multisite (met superabsorberende absorptiekern)

Afmetingen van het verband (cm)	Afmetingen van het wondkussen (cm)	REF	ZI	VE
12 x 15	7 x 10	139 357	16848144	10/100



www.Lohmann-Rauscher.com

9508366 1119 nl



# Suprasorb® P sensitive **NIEUW**

Veelzijdige wondverzorging ook voor de gevoelige huid.



## Bescherming

- vocht- en bacteriënwerend
- waterdampdoorlatend

## Efficiënt exsudaatmanagement<sup>4</sup>

- stimuleert snelle exsudaatabsorptie in het verband
- bevordert een vochtig wondmilieu<sup>3</sup>



## Zacht en comfortabel<sup>1,2</sup>

- ontziet de huid<sup>1,2</sup>
- verlaagt het risico van vastkleven aan de wond bij de verbandwisseling<sup>1</sup>
- aangenaam door goed absorberend PU-schuim<sup>6</sup>



Siliconen wondcontactlaag geschikt voor de gevoelige huid<sup>4</sup>



Efficiënt exsudaatmanagement vermindert het maceratie-risico en stimuleert de wondgenezing<sup>3,4</sup>



Douchen is mogelijk



Minimaliseert pijn bij de patiënt, en het trauma voor de wond en omliggende huid bij het verwijderen of opnieuw positioneren van het verband<sup>3</sup>

De huid is het grootste orgaan van het menselijk lichaam en heeft vele functies. De huid dient als scheiding tussen de binnen- en buitenwereld, barrière, gevoelsorgaan en thermostaat. Bij patiënten met chronische wonden is de levenskwaliteit doorslaggevend. Als wordt voldaan aan belangrijke behoeften zoals atraumatische verbandwisseling, betrouwbaar exsudaatmanagement en aangename draageigenschappen, wordt het dagelijkse welbevinden bevorderd. Het comfort van de patiënt wordt hierbij ondersteund door de keuze voor een passende wondbehandeling.

En dat is precies waar u met het nieuwe Suprasorb P sensitive de oplossing vindt: Door zijn geschiktheid voor diverse soorten wonden biedt het innovatieve wondverband talrijke voordelen voor de patiënt. Tot wel vijf verschillende materiaallagen zorgen voor een efficiënt exsudaatmanagement ter ondersteuning van de wondgenezing en beschermen tegelijkertijd de huid.<sup>1,3,4</sup>

## Verkrijgbaar in drie uitvoeringen:

**border**  
met super-absorberende absorptiekern



**border lite**  
zonder super-absorberende absorptiekern



**non-border**  
zonder super-absorberende absorptiekern



## Voor elk gebruik het juiste model.

De producten **border**, **border lite** en **non-border** zijn verkrijgbaar in diverse vormen en afmetingen.



**Suprasorb® P sensitive sacrum**

met superabsorberende absorptiekern  
Anatomisch gevormd voor gebruik op het sacrum.



**Suprasorb® P sensitive multisite**

met superabsorberende absorptiekern  
Voor het behandelen van moeilijke wondlocaties.



**Suprasorb® P sensitive heel**

met superabsorberende absorptiekern  
Voor wondverzorging aan gewrichten en de hiel.

# Suprasorb® P sensitive **NIEUW**

Verbanden voor veel verschillende wonden.

**border**  
5 lagen



voor matig tot sterk exsuderende wonden

**border lite**  
4 lagen




voor licht tot matig exsuderende wonden

**non-border**  
3 lagen




voor matig exsuderende wonden

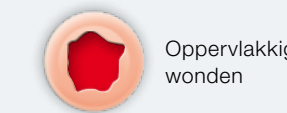


Oppervlakkige wonden



Acute wonden

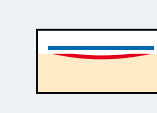

Chronische wonden

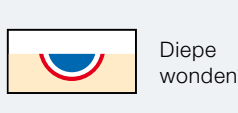

Diepe wonden\*


\* In combinatie met een geschikt primair verband.

Geïndiceerd voor oppervlakkige tot diepe wonden (in combinatie met een geschikt primair verband), bv.:

## Traumatische wonden



Schaafwonden

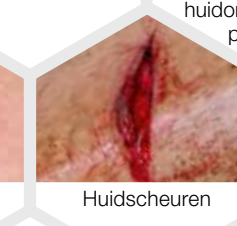

Huidscheuren




Beenzweren



Decubituswonden

## Postoperatieve wonden

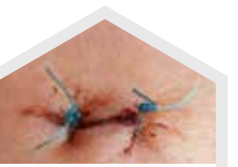

Wonden van minimaal-invasieve operaties



Chirurgische nietjes/hechtingen



Wonddehiscentie

## Chronische wonden



Diabetische voetulcers