



TEKENLEPEL de praktische en veilige manier om een **TEEK** te verwijderen bij mens en dier

Teken kunnen naast de ziekte van Lyme ook andere ziekten overbrengen zoals Q-koorts. Het is daarom belangrijk de teek bij het verwijderen niet te beschadigen, omdat er anders geïnficeerd materiaal in de huid kan komen.

TEKENLEPEL:

- Met de Teekweg Tekenlepel (TICKED OFF™) wordt de teek niet samengeknepen zoals wel het geval kan zijn bij gebruik van b.v. een pincet.
- De Tekenlepel is ontworpen om zonder een draaibeweging een teek volledig te verwijderen (in Nederland adviseert men nu ook om niet te draaien).
- Door de vorm van de Tekenlepel kan men een teek ook zelf gemakkelijk uit moeilijk bereikbare plaatsen halen zoals uit de lies of knieholte, iets wat met een pincet eigenlijk niet lukt zonder de hulp van een ander.
- U houdt "zicht" op de teek, en een teek is te verwijderen zonder dat u een leesbril hoeft op te zetten.
- Kan worden gesteriliseerd in kokend water of met alcohol.
- Door de speciale vorm weinig raakvlak met de huid zodat de Tekenlepel makkelijk over de huid schuift en waardoor een teek na verwijdering wordt "opgevangen" in de Tekenlepel en niet weg rolt.
- Geschikt voor kleine teken (nimfen) en voor grote teken (zie afbeelding).
- De Tekenlepel (TICKED OFF™) wordt al meer dan 15 jaar in Amerika gebruikt en is wereldwijd gepatenteerd.
- Is gemakkelijk mee te nemen (aan broekriem of sleutelbos te hangen).
- Verkrijgbaar bij apotheek, drogist, buitensportzaak, dierenwinkel en via de website.



Zorg dat de teek goed bereikbaar is en plaats het brede deel van de V-inkeping op de huid zo dicht mogelijk bij de teek.

Met een lichte druk op de huid wordt de Tekenlepel richting de teek bewogen zodat het smalle deel van de inkeping de teek omsluit.

**Een gelijkmatige voorwaartse schuifbeweging
verwijdert de teek**

Niet wrikken, draaien of omhoog bewegen, alleen voorwaarts schuiven!

**WWW.TEEKWEG.NL
info@teekweg.nl**

